

❖ Hand and Nail Cleaning Brush یک نوع برس پاکسازی ساخت کمپانی HEPPO در کشور چین است که برای همه افراد به منظور پاکیزگی



دست و ناخن برای جلوگیری از انتقال آلودگی و بیماری قابل استفاده می‌باشد.

❖ طول این برس‌ها حدود ۱۰ سانتی‌متر (چهار اینچ) است.

❖ این محصول یکبارمصرف نیست و امکان استفاده مجدد از آن وجود دارد.

❖ کاربرد این نوع محصول برای پاکسازی و ضدعفونی یا اسکراب دست و ناخن است.

❖ این برس‌های اسکراب منقضي نمی‌شوند و تا زمان تمیز و سالم بودن قابل استفاده هستند.

❖ برخی محلول‌های ضدعفونی طبق ادعای سازنده آن‌ها نیازی به برس در زمان اسکراب دست ندارند، این موضوع نباید باعث این برداشت اشتباه شود که نیازی به استفاده از برس پاکسازی برای تمیز کردن دست و ناخن پیش از انجام مراحل اصلی اسکراب وجود ندارد.

❖ پس از هر بار استفاده از برس اسکراب، باید مراحل پاکسازی و استریل برای آن انجام شود. برس را به شکل دستی یا با استفاده از دستگاه شستشوی خودکار (دستگاه واشینگ) می‌توان تمیز کرد. البته به دلیل سبک بودن برس‌ها، لازم است در سبد دستگاه ثابت شده باشند.


❖ دمای بالاتر از ۱۳۵ درجه سانتی‌گراد ممکن است باعث آسیب به برس‌های قابل اتوکلاو شود. توصیه می‌شود از سیکل‌های استریلایزر بخار با پارامتر دمای ۱۲۱ استفاده شود. در زمان بسته‌بندی و استریل کردن لازم است توجه شود موهای برس تحت هیچ فشاری نباشند تا کج نشوند.

❖ پیش از استریل کردن و استفاده از برس، لازم است آن را بازرسی کرد تا اگر تغییر شکل یا فرسودگی دارد دور انداخته شود.

❖ محل نگهداری برس‌ها باید دور از آلودگی باشد و در زمان نگهداری و استریل کردن، فشار فیزیکی نباید بر روی موهای برس‌ها باشد.

❖ هر زمان که موهای برس از بین بروند یا تغییر شکل دهند، یا آلودگی آن طوری باشد که قابل رفع نباشد، برس باید دور انداخته شود.

❖ چهار نوع برس در شکل زیر نشان داده شده‌اند که همگی برای دست و ناخن قابل استفاده هستند؛ البته نوع صورتی و زرد برای شستشوی وسایل و ابزار نیز کارایی دارند، ولی قابل اتوکلاو نیستند. نوع سفید و آبی قابل اتوکلاو هستند که مخصوص پاکسازی و اسکراب دست و ناخن هستند.

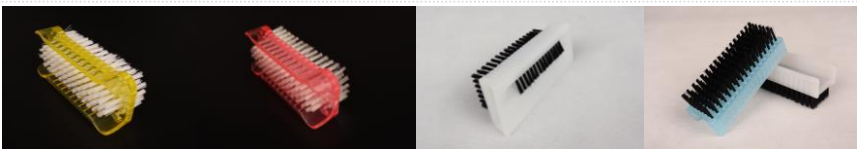

مراحل استفاده از برس اسکراب دست

(۱) برس مناسب را با توجه به

نوع و محل استفاده انتخاب نمایید.

✓ برس سه وضعیت تمیز، ضدعفونی شده، یا استریل را دارد. به منظور اسکراب دست لازم است برس استریل باشد.

(۲) دست‌ها لازم است با آب و صابون شسته شده باشند.

(۳) ضمن رعایت شرایط آسپتیک، برس استریل از بسته‌بندی خود خارج شود و به شخص مصرف‌کننده ارائه شود.

✓ پیش از استفاده از برس برای دست دیگر، برس را آبکشی نمایید.

✓ از موهای کوچک‌تر برس در سمت دیگر آن، برای تمیز کردن ناخن‌ها می‌توان استفاده کرد.

(۴) در صورت استفاده از برس به همراه محلول، زمان اسکراب طبق توصیه سازنده محلول و پروتکل خود مرکز خواهد بود.

(۵) پس از پایان استفاده از برس، آن را با توجه به روش تعریف‌شده در مرکز، در محل لازم برای فرآیند آماده‌سازی مجدد قرار دهید.

✓ در صورت استفاده برای عمل جراحی، دست‌ها را پس از آبکشی با استفاده از حوله استریل یا هر روش درست دیگر خشک

نمایید و پوشش‌های لازم فردی را به ترتیب تعریف‌شده در مرکز یا طبق گایدلاین‌ها بپوشید.

✓ لطفاً پیش از عمل جراحی بعدی، مراحل اسکراب دست‌ها را به طور کامل تکرار نمایید.