

❖ **Dry Sterile Brush-Sponge** یک محصول یک‌بار مصرف ساخت کمپانی لهستانی **Informer Med** است که برای همه افراد

به منظور پاکیزگی و جلوگیری از انتقال بیماری و آلودگی قابل استفاده می‌باشد.

❖ برس و اسفنج این محصول، نرم و محکم هستند.

❖ این محصول دارای چوب ناخن برای تمیز کردن زیر ناخن نیز می‌باشد.

❖ این محصول برای شستشو و ضد عفونی کردن دست‌های پرسنل و بیماران است.

❖ هر برس در یک پک مجزا استریل شده است و نگهداری آن شرایط خاصی ندارد.

❖ برخی محلول‌های ضد عفونی‌کننده در مراحل اصلی اسکراب نیازی به استفاده از برس ندارند، این قابلیت چنین محلول‌هایی

نباید این برداشت اشتباه را باعث شود که لازم نیست از برس پیش از مراحل اصلی اسکراب استفاده شود.

روش استفاده از برس اسکراب جراحی

(۱) دست‌های خود را طبق پروتکل مربوطه با آب و صابون بشویید و خشک کنید.

(۲) در ابتدا پاکت برس را از گوشه با کمک دست به راحتی باز کنید.

(۳) در حالی که برس را از بسته خارج می‌کنید و آن را از وسط نگه داشته‌اید، پاکت آن را دور بیندازید.

(۴) اسفنج و برس را به مواد ضد عفونی آغشته کنید.

(۵) با استفاده از برس و چوب ناخن، زیر ناخن‌ها را تمیز کنید.

(۶) بسته به نوع محلول مورد استفاده، طبق دستورالعمل سازنده محلول، با یا بدون استفاده از برس و اسفنج، مراحل اصلی اسکراب را

انجام دهید (در صورت استفاده از برس، در پایان استفاده برای یک دست، پیش از استفاده برای دست دیگر، آن را آبکشی

نمایید).

(۷) زمان اسکراب طبق پیشنهاد سازنده محلول و پروتکل مرکز درمانی خواهد بود.

(۸) در صورت آبکشی یا خیس بودن دست‌ها، اجازه دهید دست‌ها خشک شوند یا با استفاده از حوله استریل یا هر روش صحیح دیگر

دست‌ها را خشک کنید و سپس کلاه و گان بپوشید.

(۹) دستکش‌های استریل بپوشید.

(۱۰) پس از انجام عمل جراحی، دستکش‌ها را دور بیندازید و دست‌ها را با آب و صابون بشویید و پیش از عمل بعدی، مراحل اسکراب

دست‌ها را به طور کامل تکرار کنید.