

❖ **Dispo Wash Glove** یک محصول یک بار مصرف ساخت کمپانی **Dispotech** در ایتالیا است که برای همه افراد قابل استفاده

می باشد.

❖ این محصول امکان انتقال بیماری و عفونت را از بین می برد.



❖ این محصول دارای مایع نیست و می توان آن را در هر جایی نگه داری و استفاده کرد.

❖ این محصول از پارچه نفاخته در سطح پزشکی تهیه شده است.

❖ در مواد این محصول از سفیدکننده ها استفاده نشده است و ایمن است.

❖ وجود لایه لمینیت درون این کیسه، از مرطوب شدن دست یا دستکش جلوگیری می کند.

❖ گرچه این محصول به عنوان یک لیف یکبار مصرف به منظور کنترل عفونت و حفاظت از پرسنل درمانی در زمان نیاز برای

بیماران بستری و ICU می باشد، اما برای سالمندان، ورزشکاران، افرادی که در سفر هستند، مراکز زیبایی و اسپا، و شرایط

اضطراری و بحران نیز کاربرد دارد.

روش شستشوی بدن بیمار بستری

- در هر مرحله، بیمار را از عملی که قصد انجام آن را دارید آگاه نمایید تا بیشترین همکاری ممکن را به دست آورید.
- نوع و وضعیت پوست بیمار را بررسی کنید.
- به منظور حفظ حریم خصوصی بیمار، در و پنجره ها را در زمان شستشو بسته نگه دارید.
- دست هایتان را بشویید و از دستکش های یکبار مصرف استفاده کنید.
- در حین کار، بسیار مراقب وسایلی که به بیمار متصل است باشید.
- همیشه از شستشوی تمیزترین قسمت بدن بیمار آغاز نمایید و به طور منظم با آلوده ترین قسمت کار را تمام کنید.
- به منظور حفظ حریم خصوصی بیمار، هر قسمت را که قصد دارید تمیز کنید برهنه کنید و پس از شستشو آن قسمت را بپوشانید و سپس قسمت بعدی بدن بیمار را برهنه کنید.
- برای شروع، محصول را با آب گرم با دمای مناسب و با ژل یا محلول شستشو مرطوب کنید.
- به این ترتیب ادامه دهید: صورت و گوش و گردن، شانه، تمام طول دست ها و زیر بغل ها و لای انگشتان، سینه، شکم، تمام طول پاها و لای انگشتان. پس از برگرداندن بیمار به پهلو، پشت گردن، کمر، پشت ران و کپل ها، اندام تناسلی و ناحیه پرینه.
- محصول را دور بیندازید و با حوله یکبار مصرف به همان ترتیب بدن بیمار را خشک کنید؛ به چین های پوستی توجه کنید (اگر از ژل، صابون یا شامپوی بدنی استفاده می کنید که نیاز به آبکشی بدن دارد، بدن را باید آبکشی و سپس خشک کنید).
- حوله را دور بیندازید و در حالی که بیمار به پهلو خوابیده است، پارچه زیر بیمار را به سمت وسط تخت جمع کنید و آن را با یک پارچه تمیز جدید جایگزین کنید.
- با کرم مرطوب کننده پوست بدن بیمار را ماساژ دهید و لباس تمیز جدید به تن بیمار بپوشانید.