



- ❖ Spectra-Clave یک محلول شستشو محصول کمپانی امریکایی STERIS IMS است که برای تمیز کردن چمبر استریلایزر بخار تولید می‌شود.
- ❖ حجم این محصول برابر ۲۳ اونس معادل یک لیتر است.
- ❖ محلول را همواره در ظرف خودش نگه‌داری نمایید.
- ❖ این محصول جهت تمیز کردن چمبر انواع استریلایزرهای بخار کاربرد دارد.
- ❖ در زمان استفاده از این محصول، نباید از برس‌های فلزی و سمباده استفاده کرد.
- ❖ این محصول، رسوب‌های معدنی باقی‌مانده بر روی دیواره‌های چمبر را از بین می‌برد.
- ❖ طبق استانداردهای مرتبط با فرآیند استریلیزاسیون از جمله AAMI ST79، بازرسی و مراقبت از چمبر، بخشی از نگهداری روزانه و هفتگی محسوب می‌شود.
- ❖ استفاده هفتگی از این محصول، دیواره‌های چمبر استریلایزر را تمیز و درخشان نگه می‌دارد و عمر مفید و زیبایی چمبر را به همراه خواهد داشت.
- ❖ تمیز و براق بودن داخل چمبر و نبود آلودگی در چمبر، نگرانی از آلوده‌شدن پک‌ها را در زمان استریلیزاسیون از بین می‌برد.
- ❖ در مرحله خشک‌کردن پک‌ها در استریلایزر بخار، بخشی از خشک شدن پک‌ها توسط انتقال دما به شکل تابشی از دیواره‌های چمبر انجام می‌شود. یک چمبر تمیز و براق، خشک شدن پک‌ها را سریع‌تر و کاراتر انجام خواهد داد.
- ❖ یکی از دلایل وجود پک مرطوب (Wet Pack) در پایان سیکل، تمیز نبودن دیواره‌های چمبر استریلایزر است. از طرف دیگر، رسوبات ایجادشده بر روی دیواره‌های چمبر، گرم‌شدن یکنواخت چمبر را مورد تأثیر قرار می‌دهد.
- ❖ به هیچ وجه، محلول را بر روی دیواره‌های چمبری که گرم یا داغ است، نباید اسپری کرد. چمبر باید کاملاً خنک باشد.
- ❖ در صورتی که محلول به اشتباه توسط فردی نوشیده شد، دهان را با آب کافی بشوید و به پزشک مراجعه کنید. در صورتی که با پوست و چشم تماس پیدا کرد، با آب فراوان چند دقیقه شسته شود و به پزشک مراجعه شود. اگر لباس فرد با محلول مرطوب شد، لباس کاملاً شسته شود.
- ❖ از این محصول فقط برای تمیز کردن چمبر استریلایزر بخار استفاده نمایید و برای ابزارها و سطوح دیگر، لطفاً محلول‌های مربوط به آن‌ها را به کار گیرید، استفاده برای سطوح دیگر ممکن است منجر به آسیب آن سطوح شود.

## روش استفاده از محلول شستشوی چمبر

- ۱) برای استفاده از محلول، مطمئن شوید که دستگاه خاموش و چمبر کاملاً خنک باشد.
- ۲) تجهیزات ایمنی فردی (PPE) شامل روپوش ضد آب، دستکش، محافظ صورت، و محافظ چشم را بپوشید.
- ۳) محلول را بر روی دیواره‌های چمبر اسپری کنید.
- ۴) اجازه دهید به مدت ۳ تا ۵ دقیقه محلول بر روی دیواره‌ها بماند.
- ۵) با استفاده از برس با موهای نایلونی محکم (مثلاً برس کد ۵۲۸-۵۴)، دیواره‌ها را با فشار برس کشی نمایید.
- ۶) محلول و ذرات جدانشده را با استفاده از حوله‌های تمیز و مرطوب از روی دیواره‌ها پاک کنید.
- ۷) سپس با استفاده از حوله‌های تمیز و خشک، دیواره‌های چمبر را خشک کنید.



✓ این محلول برای چمبر دستگاه‌های مشابه نیز کاربرد دارد.

✓ هر زمان که ظرف محلول خالی شد، برای دورانداختن آن با مسئول بهداشت محیط مرکز یا فرد مربوطه مشورت نمایید.